

## Genel Elektrot Bakımı

Elektrot hazırlığı ve uygulanması uzman bir sağlık görevlisi nezaretinde yapılmalıdır.

Kullanmadan önce elektrotları aşırı yıpranma veya hasar açısından inceleyiniz. Elektrot teli, terminasyon veya yüzey alanı yıpranmışsa elektrotu atınız.

Elektrotların hatalı depolanması, hazırlığı, kullanımı veya atılmasından kaynaklanan yaralanma, enfeksiyon veya diğer hasarlardan Cadwell sorumlu değildir.

### 1. Atılabilir İğne Elektrotlar

STERILE

Elektrotlar steril olarak sağlanır  
Kullanmadan önce paketi  
inceleyiniz



Mühür veya torba açılmadığı  
veya hasar görmediği sürece  
elektrotlar sterilidir.



Son kullanma tarihinden önce  
kullanınız



Sadece tek hastada kullanılır



**Tekrar kullanmayınız**

İğne elektrotlarını tıbbi kesici maddelerin atılmasıyla ilgili onaylanmış prosedürler doğrultusunda delinmeye dayanıklı bir kesici madde konteynerine atınız.

### 2. Keçe Pedler



Sadece tek hastada  
kullanılmalıdır



Steril olmayan cihazlar



**Tekrar kullanmayınız**

### 3. Yüzey Elektrotları, Kablo Telleri, Keçe Pedli Çubuklar ve Elektrikli Stimülatör Problemleri

#### Temizlik ve Dezenfekte Etme

1. Hafif deterjan ve su solüsyonu içinde yıkayınız.
2. Jelleri, macunları ve diğer oluşumları çıkarmak için yumuşak, temiz bir fırça kullanınız.
3. Yıkadıktan sonra, kuvaterner amonyum, Lysol I. C. veya Envirocide™ benzeri alkol solüsyonu veya diğer koroziv olmayan dezenfektan ajanlarla dezenfekte ediniz. (Doğru kullanım ve atma bilgisi için kimyasal üreticisinin talimatlarına bakınız)

Maksimum ömür için elektrotları sıvılara uzun süre batırmayınız, ağartıcı veya koroziv ajanlarla temizlemeyiniz.

### 4. Tekrar Kullanılabilir İğne Elektrotlar

#### Temizlik

Hafif deterjan veya alkole batırılmış yumuşak bir bezle siliniz

#### Sterilizasyon

Etilen Oksit gazı (ETO) veya buhar otoklavı kullanarak sterilize ediniz. Sterilizasyondan önce elektrikli stimülatör problemleri ve keçe pedleri çıkarınız.

#### Otoklav

120°C (250°F) ve 103kPa'da (15 psi) 15 dakika buhar otoklavı uygulayınız. Detaylı bilgi için otoklav üreticisi tarafından sağlanan talimatlara bakınız.

#### ETO

Detaylı bilgi için sterilizasyon ekipmanı üreticisi tarafından sağlanan talimatlara bakınız.